

Als u hulp nodig heeft, stuur dan een e-mail naar help@moocall.com of chat met ons via www.moocall.com.



Stap 1: Activeren

- Ga naar www.moocall.com/register en vul uw gegevens in.
- Als u geen toegang heeft tot internet, neem dan telefonisch contact met ons op.
- Als de sensor niet is geactiveerd, schakelt deze direct uit na het inschakelen.

Stap 2: Opladen

- Verwijder het rode rubber. Gebruik een platte schroevendraaier om te drukken op de inkeping met stippen..
- Verwijder de oplaadklep en sluit de oplaadkabel aan.
- Zodra het opladen is voltooid, plaatst u de oplaadklep terug en doet u het rode rubber om de oplaadklep heen.
- BELANGRIJK: Verwijder de oplaadklep alleen tijdens het opladen van het apparaat.
- LET OP: Forseer de USB-kabel niet in de oplaadpoort van de sensor.

Stap 3: Aanzetten

- Houd de knop vijf seconden ingedrukt.
- Het lampje op de sensor knippert door verschillende kleuren en blijft daarna blauw knipperen (om de vijf seconden).
- Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de knop tien seconden ingedrukt totdat u een roze lampje ziet.
- Als de sensor zichzelf uitschakelt na meerdere kleuren te hebben geknipperd, moet deze worden geactiveerd of is er een netwerkprobleem. Neem in dat geval contact op met Moocall.

Stap 4: Testen

- Test de sensor op de locatie waar deze wordt gebruikt om te controleren of er voldoende netwerkdekking is.
- Schakel de sensor in en wacht tot deze blauw knippert.
- Druk stevig op de knop gedurende een halve seconde. Laat los en druk onmiddellijk nogmaals.
- U moet binnen drie seconden twee keer op de knop drukken. Dit kan meerdere pogingen vergen.
- Als dit correct wordt gedaan, begint de sensor groen te knipperen.
- U zou binnen tien minuten een SMS, een e-mail en een Moocall-appmelding moeten ontvangen.
- Ontvangt u geen melding, neem dan contact met ons op.

Stap 5: Bevestigen aan de staart

- Plaats de sensor op de staart van een koe die bijna moet kalven. Zorg ervoor dat de sensor aan de tegenovergestelde kant van de vulva wordt geplaatst.
- Steek de riem in de ratel. Sluit de ratel en klik het deurtje eroverheen.
- Trek aan het losse uiteinde van de riem totdat de sensor stevig om de staart zit.
- Controleer de stevigheid van de sensor door de pasvorm te testen. De sensor moet licht zijwaarts kunnen bewegen, maar mag niet naar beneden glijden.
- De sensor moet licht zijwaarts kunnen bewegen, maar mag niet naar beneden glijden.
- Pas de spanning van de riem aan indien nodig totdat deze goed zit.
- BELANGRIJK! NIET TE STRAK AANBRENGEN!
- Een te strak aangebrachte sensor kan valse alarmen veroorzaken en mogelijk blijvende schade aan de staart aanrichten.
- De rubberen voering kan worden bijgesneden afhankelijk van de grootte van de staarten van uw vee
- Zorg ervoor dat de voering niet overlapt.
- Onjuist formaat rubber kan ongemak veroorzaken en valse alarmen genereren.

Stap 6: Resetten

- Na een kalfgeboorte drukt u één seconde op de knop om te resetten.
- Zodra het lampje verandert van continu rood naar knipperend blauw, is de sensor klaar voor de volgende koe.
- De sensor reset zichzelf automatisch na een uur als dit niet handmatig gebeurt.
- BELANGRIJK: Dompel het apparaat niet onder in vloeistoffen en spoel geen vloeistoffen over het apparaat. Reinig alleen met een vochtige doek.

Problemen oplossen

- Sensor valt eraf: Stel de sensor strakker in of plaats deze hoger, waar de staart dikker is.
- Meer dan twee alarmen per koe of alarmen meer dan twee uur voor het kalven: Het rode rubber overlapt of het apparaat zit te strak.
- Apparaat schakelt niet in: Controleer of het apparaat is opgeladen. Neem contact met ons op als het probleem blijft bestaan.
- Sensor blijft alle kleuren knipperen en schakelt niet over naar blauw: Neem contact op met Moocall.

Lichtindicator

Knipperend blauw: Ingeschakeld en klaar voor gebruik

Knipperend oranje: Lage batterij

Continu groen: Batterij volledig opgeladen

Continu rood: bezig met kalven

Knipperend groen: Test in uitvoering

Knipperend rood en blauw: Software wordt bijgewerkt

Knipperend alle kleuren: Sensor maakt verbinding