



ADAPTARAP™

Gebruiksaanwijzing

Zodra is vastgesteld dat een verband moet worden toegepast kunnen de volgende stappen ervoor zorgen dat met ZINPRO ADAPTARAP de beste resultaten worden bereikt.

Als wondbehandeling noodzakelijk is, dan kan het beste gaas worden toegepast om de behandeling op zijn plaats te houden. Dit is essentieel als de behandeling bestaat uit een spray, zalf of andere vloeistof die ADAPTARAP voortijdig zou kunnen oplossen.

Breng ADAPTARAP aan zoals u ook traditionele pootverbanden aanlegt. Oefen een constante druk uit bij het omwikkelen van de poot en zorg voor zo min mogelijk ruimte tussen de verbandlagen voor de beste hechting. ADAPTARAP is niet elastisch, waardoor het strak gewikkeld kan worden, zonder risico op drukwonden.

Breng het verband aan tussen de klauwen en rondom de poot van het dier. Maak niet meer dan één 360 graden wikkeling om de poot zonder weer een keer tussen de klauwen door te gaan. Hierdoor breekt ADAPTARAP sneller af. Bedek de aangetaste poot liefst tot net onder de hubertusklauw aan de achterkant, zodat het verband niet afzakt tijdens de behandelingsperiode.

ADAPTARAP is ontworpen om gedurende twee uur tot vijf dagen rond de poot te blijven zitten als het correct is aangebracht. Ten minste twee omwikkelingen die de hak bedekken zijn nodig voor minimale gebruiksduur. De gebruiksduur kan worden verlengd door het aantal wikkelingen en de lengte van ADAPTARAP te verhogen.

Na aanbrengen van de gewenste hoeveelheid ADAPTARAP dient u het uiteinde nat te maken met een beetje water en het uiteinde stevig aan te drukken tegen het aangebrachte verband. Dit zorgt voor verzegeling van het verband. In extreem koude omstandigheden kunt u hiervoor het beste warm water gebruiken.